


タイジナースキャビ

HC-38NA

このたびは、タイジナースキャビをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この製品を安全に正しくご使用いただくため、お使いになる前にこの取扱説明書をお読みいただき、十分にご理解のうえ、ご使用ください。

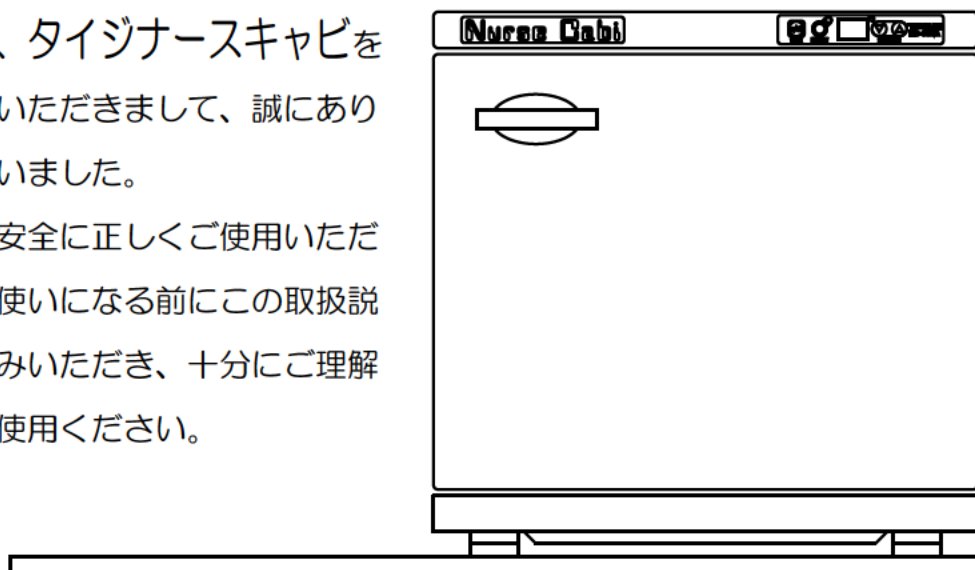

- この説明書の主な内容は、製品の機能、各部の名称、ご使用方法、安全上の注意事項、製品の仕様、アフターサービスなどからなっています。
- 説明書に記載されている注意事項をお守りいただけないときは、人身事故につながる恐れがあります。また記載されていない方法で使用しないでください。くれぐれもご注意下さい。

もくじ

■安全上のご注意	2～4	■ご使用手順	7
■使用目的	5	■安全装置及び回路図	8
■動作のしくみ	5	■アフターサービス	8
■各部の名称	5	■製品仕様	9
■ご使用前の確認および設置	6		

タイジ株式会社

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生ずることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになったあとは、いつも手元に置いてください。

絵表示の例

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	△記号は、警告、注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。
	⊘記号は、禁止の行為があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は必ずアース線を接地する）が描かれています。

警告

次の(1)～(13)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表示しています。

	設置注意	(1)必ず水平で安定した場所に設置してください。転倒・落下の恐れがあります。
	分解禁止	(2)修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。発火、異常動作することがあります。
	アースを接続する	(3)アース工事を必ず行ってください。 ・コンセントにアース端子がない場合は、電気店あるいは販売店に相談して取り付けてください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 ・ガス管、水道管に接続しないでください。
	水かけ禁止	(4)水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の恐れがあります。
	点検掃除	(5)差し込みプラグの刃および刃の取り付け面に、ほこりが付着していないか定期的に確認し、ガタのないように刃の根元までコンセントに差し込んでください。ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。

 禁止	(6) 電源コードを傷つけないでください。 加工したり、引っ張ったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしますと、電源コードが破損し感電や火災の原因になります。 電源コードは、熱源に触れないでください。
 たこ足配線禁止	(7) 電源は必ずAC100Vで15A以上の専用コンセントからお取りください。二股や分岐ソケットからのご使用は異常発熱・火災の原因となります。
 禁止	(8) 差し込みプラグの刃を故意に曲げ、抜けないようにして使用しないでください。接触不良により火災の原因になります。
 プラグを抜く	(9) 異常な臭いや音がしたり、煙が出たり、内部に水や異物が入った場合はすぐに電源スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因となります。
 接触禁止	(10) 雷がなりはじめたら差し込みプラグには触れないでください。感電の原因となります。
 屋外禁止	(11) 屋外で使用しないでください。 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電・感電の原因になります。
 放置禁止	(12) 廃棄は専門の業者か、公的機関、又はお買い求めの販売店に依頼してください(有料になる場合もあります)。 放置しますと、第三者が製品を改造したり、タオル蒸し器以外の目的で使用したりすると、思わぬ事故の原因になります。
 禁止	(13) 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。



注意

次の(1)～(16)の項目は、その内容を無視して誤った取り扱いをした場合、使用者が傷害を負う危険が想定される、または物的損害のみの発生が想定される場合を表示しています。

 プラグを持って抜く	(1) 差し込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火の原因になります。
 濡れ手禁止	(2) 濡れた手で差し込みプラグや電源スイッチなどの電気部品に、触れたり操作したりしないでください。 感電の原因になります。
 注意	(3) 製品を落としたり、強い衝撃を加えないでください。 故障、火災の原因になります。
 注意	(4) 製品の梱包用ポリ袋は、すぐに廃棄してください。 窒息事故防止のため、お子様の手の届くところにそのまま放置しないでください。

 使用時以外	(5) 使用時以外は、スイッチを切り、差込みプラグをコンセントから抜いてください。感電・漏電火災などの原因となります。
 禁止	(6) 電源コードや差込みプラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
 禁止	(7) 製品の上に、重いものや水を入れたものを置かないでください。製品を傷つけたり、ケガ・ショート・感電・サビ・故障の原因になります。
 耐熱温度120℃以上のポリ袋の使用  ビニル袋使用禁止	(8) タオルはなるべくポリ袋入りタオルを使用してください。ポリ袋は必ず耐熱温度120℃以上の物を使用してください。ポリ袋に入っていないタオルを使用しますと、乾燥し、変色します。自家製のタオルを使用する場合は、やや固めにしぼったタオル（乾燥時の約2.5倍の重量）をポリ袋に入れ、袋の口を閉じて使用してください。 ビニル袋は熱に弱いので、使用しないでください。
 禁止	(9) 同じタオルを1日以上庫内に放置しないでください。変色、異臭の原因になります。
 禁止	(10) 庫内壁面温度が100℃以上になることがあります。タオルの庫内への収納は、庫内天井や壁に接するほど多量に入れないでください。ポリ袋が溶けて、変色する場合があります。
 棚皿使用	(11) タオルは必ず棚皿を使用して、庫内に収納してください。棚皿を使用しないと、ポリ袋が溶け、タオルが変色します。
 高温注意	(12) 通電中は庫内の壁や棚皿、ドアバックが熱くなっています。タオルの出し入れに注意してください。ヤケドの恐れがあります。
 水分除去	(13) 庫内に水分をためないでください。 庫内に水分がたまりますと、水漏れや誤作動の原因となります。 (14) ご使用後は、必ず庫内や棚皿等の水分を拭き取り、異物は取り除いてください。タオルが変色したり、異臭の原因となります。また、次回ご使用時の誤動作の原因となります。 (15) ドレイン受けの水は、こまめに捨ててください。 ドレイン受けに水分が溜まりますと、あふれたり、異臭の原因となります。
 禁止  取扱注意	(16) 殺菌灯から照射される紫外線は人体に有害です。肉眼で直視したり皮膚に直接当てたりしないでください。 安全上、殺菌灯は扉開放時に自動的に消灯する構造になっています。扉開放時にもかかわらず、殺菌灯が点灯している場合は、電源を切り、差込みプラグを抜いて速やかに最寄りの販売店に修理を依頼してください。 ※(点灯確認モード中は扉開放時にも点灯しますのでご注意ください。)

油脂分の付着した手などで、樹脂(プラスチック)部分に触れたり、油脂分を多量に使用する場所に本機を設置する場合は、毎日必ず、湯で薄めた中性洗剤を含ませた布等で樹脂(プラスチック)部分を拭き、やわらかい布で乾拭きしてください。樹脂(プラスチック)は油に対して、あまり強くありません。


使用目的

この製品は屋内専用の電気タオル蒸し器で、水分を含んだタオルを温めて使用する目的で作られています。それ以外の用途に使用される場合は当社にご相談ください。

動作の仕組み

この製品は庫内を温めるためのヒーターを備えています。温度調節器により庫内の温度を約30℃～90℃に保つようになっています。(但し室温20℃時の庫内中央の空気温度です。)

各部の名称

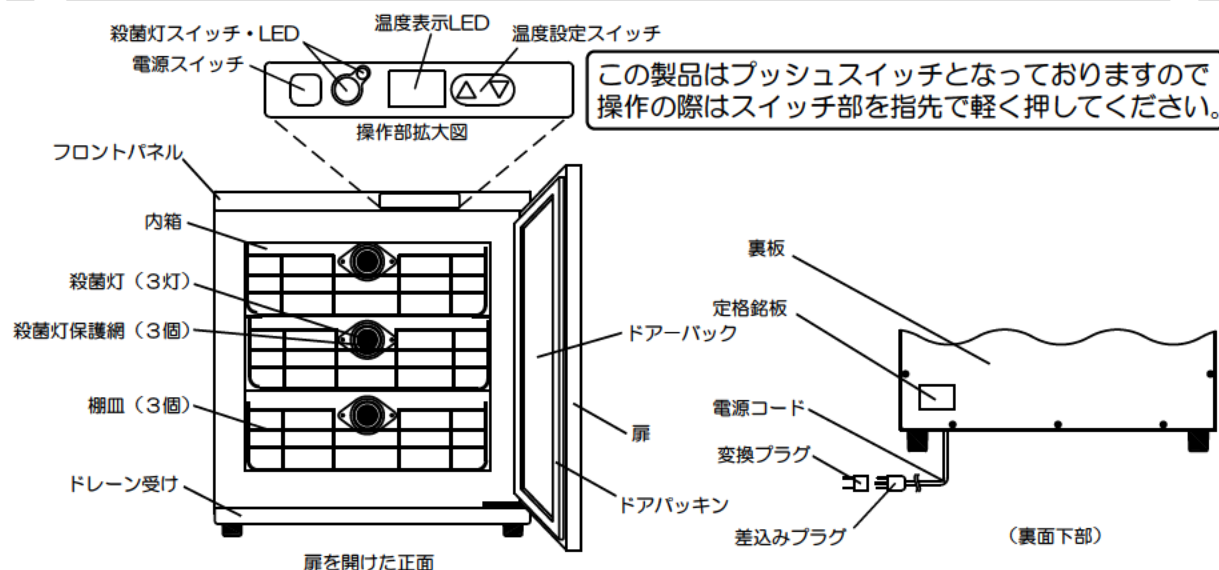

操作部の名称・機能	電源スイッチ	「on」	- 温度表示LEDに現在の設定温度を約3秒間表示した後、庫内の温度が表示され、設定温度による温度制御が始まります。 - 殺菌灯及び殺菌灯LEDが点灯します。(前回点灯していた場合)
	電源スイッチ	「off」	- 温度制御を終了し、殺菌灯を消灯します。(点灯していた場合) ※電源を切ったときの設定温度と殺菌灯の点灯・消灯の状態は保存され、次回電源投入時には前回と同じ状態で使用できます。
	殺菌灯スイッチ	扉閉時	- 殺菌灯を点灯・消灯します。点灯時には殺菌灯LEDが点灯します。 ※初めてご使用の場合は、消灯に設定されています。 ※殺菌灯交換の目安は約2年です。(1日3時間使用時。使用条件により異なります。)
	殺菌灯スイッチ	扉開時	- 殺菌灯は点灯しません。(扉開放時には、通常殺菌灯は点灯しません。) ※点灯確認モード：扉を少し開いた状態で殺菌灯スイッチを3秒以上押すと、殺菌灯が3秒間点灯いたします。殺菌灯を直接見ないでください。
	温度設定スイッチ		- 庫内温度表示中に温度設定スイッチを押すと温度設定表示になり、温度設定が可能になります。操作終了後約5秒で設定が完了します。 ※初めてご使用の場合は、70℃に設定されています。 ※80～90℃設定で長時間使用されますと、タオルが変色したり乾燥することがあります。長時間のご使用はお控えください。

ご使用前の確認および設置

1. 梱包箱から製品を取り出し、保証書、取扱説明書、付属品をご確認ください。
2. 製品を以下の条件下に設置してください。
 - 水平で安定した所。
 - 風通しのよい所。
 - 熱の影響をうけない所に設置し、直射日光を受ける所やガスコンロ、レンジ等の熱源の近くはさけてください。(50cm以上離してください。)
 - 湿気の多い所や、水のかかり易い場所には置かないでください。
3. アース工事
感電防止のため、必ずアースを正しく取り付けてください。
詳しくは、お買い求めの販売店にご相談ください。アースの付け外しは、必ず差込みプラグをコンセントから抜いて行ってください。

コンセント部が3Pタイプの場合

差込みプラグを根元までしっかり差し込んでください。アースも同時に接続されます。

コンセント部にアース端子がある場合

付属の変換プラグのアース線(緑線)を確実にコンセント部のアース端子に取り付けてください。

コンセント部にアース端子がない場合

D種接地工事が必要ですので販売店にご相談ください。

(接地工事は電気工事士の資格が必要です。)

次のような場所にはアース線を取り付けしないでください。


(法令等で禁止されています。)

◇ガス管……………爆発や引火の危険があります。

◇電話線や避雷針…落雷のとき危険です。

◇水道管……………途中から塩ビ管になっていることが多いため避けてください。


4. ドレイン受け(露受)の取り付け
ドレイン受けは、両端を持って水平に奥まで確実に差し込んでください。
ドレイン受けに溜まった水は、ドレイン受けを水平に静かに抜き取り、捨ててください。
捨てた後は元に戻しておいてください。
ドレインが溜まりやすい場合は、ドレイン受けにホースを取り付け、バケツなどで集めるようにしてください。

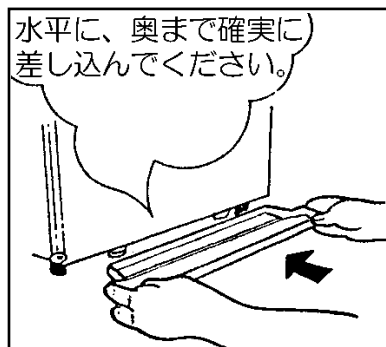

●ドレインホースの取り付け方法

左右どちらか一方のホース取り付け部(図①)の薄くなっている部分(図②)をラジオペンチなどで取り除き、内径8mm程度のホースを差し込んでください。

※その際、工具や樹脂の切断面で指など怪我をされないようご注意ください。

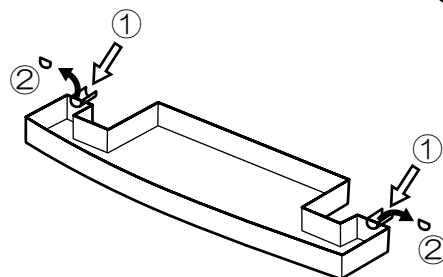


ご使用手順

※「ご使用前の確認および設置」(P.6)をお読みいただき、正しく設置した上でご使用ください。


ご使用方法

1. 差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。
2. タオルを棚皿に並べ庫内に入れてください。
 - 庫内の天井や壁面、扉に接触するほど多量に入れないでください。
3. 扉をしっかりと閉めてください。
 - ドレーン受けが正しく取り付けられていることをご確認ください。
4. 電源スイッチを「on」にしてください。
現在の設定温度が3秒間表示された後、庫内の温度が表示されます。
5. 温度設定スイッチでお好みの温度を設定してください。
設定操作を終了してから5秒後に設定した温度で制御を開始します。
 - 一度設定した温度は、電源を切った場合も保存されますので次回も同じ設定温度でご使用いただけます。
 - 設定終了後5秒以内に電源スイッチを「off」した場合は、設定温度の変更は反映されません。
6. 必要な場合は、殺菌灯スイッチを入れ点灯してください。
 - 殺菌灯の点灯・消灯の設定も電源を切った場合も保存されますので次回も同じ設定でご使用いただけます。

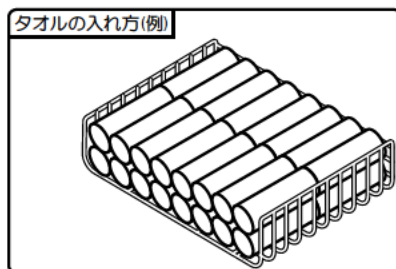

タオルの入れ方(例)

操作部拡大図

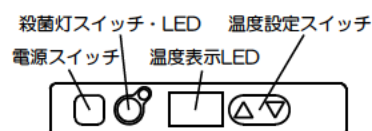

この製品はプッシュスイッチとなっておりますので操作の際はスイッチ部を指先で軽く押してください。

ご使用中

1. タオルを出し入れする場合は、棚皿や内箱が熱くなっておりますので触れないように注意してください。
2. 扉が開いている場合は、安全上加熱をいたしません。なるべくすばやく出し入れを済ませ、扉を閉じてください。扉を10分以上開放状態にいたしますと、ブザーが鳴り温度表示LEDに「OP」と表示いたします。扉を閉じるか電源を切ると表示が解除されます。
※扉を閉めても表示が解除されない場合や、電源を入れなおしても再度「OP」を表示する場合は差し込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ(株)にアフターサービスをお申し付けください。


ご使用後

1. 製品の電源スイッチを「off」にしてください。(温度表示LEDが消えます。)
2. コンセントから差し込みプラグを抜いてください。
3. 本体が冷えてから残ったタオルを取り出し、内箱の汚れや残った水分をよく拭き取ってください。棚皿は水洗いしてください。
4. ドレーン受けに溜まった水を捨て、水で汚れを洗い流してください。
5. 本体についた汚れは、乾いた布か水を含ませ固く絞った布で拭いてください。
※汚れがひどい場合は中性洗剤を使用してください。研磨剤入りの洗剤やシンナー等の溶剤を使用しないでください。
6. 庫内が臭うのを防ぐため、少しの間扉を開けて残った水分を乾燥させてください

安全装置及び回路図

この製品は何らかの原因で異常に温度が上昇した時に、通電を遮断する温度ヒューズが付いています。温度ヒューズが動作した場合、電源スイッチを押しても電源が入りませんので、差込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ(株)にアフターサービスをお申し付けください。

また、温度表示LEDにエラーコード(E0～E3)が表示された場合や「OP」表示が解除できない場合はすぐにご使用を止め、差込みプラグを抜いて、お買い求めの販売店、最寄りの取扱店またはタイジ(株)にアフターサービスをお申し付けください。

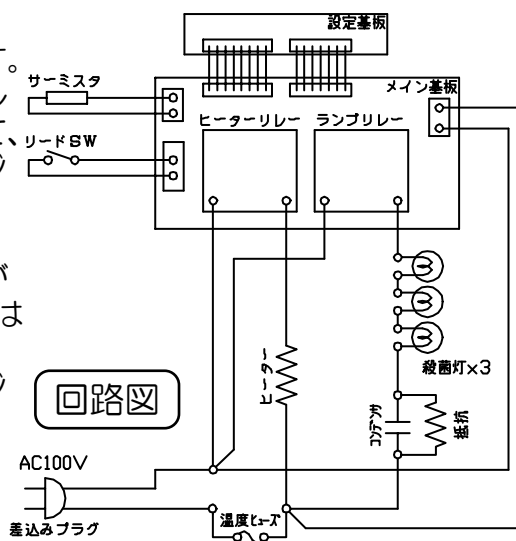

アフターサービス

- アフターサービスは、お買い求めの販売店または最寄りの取扱店かタイジ(株)にお申し付けください。
- この製品には保証書が付いています。無償保証期間はお買い上げから1年間です。但し、「使用目的」(P.5)以外の用途や誤った方法で使用情况の場合の故障は、保証期間内でも原則として有料修理になります。また殺菌灯は消耗品ですので、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- 保証書の記載内容をご確認のうえ、大切に保存してください。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は生産打ち切り後5年間です。
(注)補修用性能部品とはその機能を維持するために必要な部品です。
- 弊社へ直接ご連絡の際は下記へ

東日本営業所 川崎市川崎区大川町8-2

〒210-0858 TEL 044-329-5880

西日本営業所 大阪市東淀川区下新庄5-26-21

〒533-0021 TEL 06-6990-6853

お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社及び当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通りお取り扱いいたします。

1. 当社はお客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認、新製品開発などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認義務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を適切な管理と利用、保護いたします。
3. お客様からのご本人の個人情報に関する問い合わせ、変更、削除については、ご相談いただきました窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲内で速やかに対応いたします。

製品仕様

機 種	HC-38NA
定格電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	410W
温度調節	表示付マイコン式
庫内温度	標準温度30～90℃(室温20℃)
殺菌灯	GTL-2(2W)×3
安全装置	温度ヒューズ
外形寸法	W450mm×D410mm×H450mm
庫内寸法	W360mm×D316.5mm(殺菌灯部分278mm)×H345mm
庫内容量	38L
質 量	13kg
付 属 品	棚皿 3、ドレイン受け 1、変換プラグ 1

※仕様および外観の一部を改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

タイジ株式会社のホームページもご覧下さい。 <http://www.taiji.co.jp/>